

**INSTRUCCIONES DE USO**  
**MOUNJARO® (mown-JAHR-OH)**  
**(tirzepatida)**  
**inyección para uso subcutáneo**



pluma de dosis única de 2.5 mg/0.5 ml  
 pluma de dosis única de 5 mg/0.5 ml  
 pluma de dosis única de 7.5 mg/0.5 ml  
 pluma de dosis única de 10 mg/0.5 ml  
 pluma de dosis única de 12.5 mg/0.5 ml  
 pluma de dosis única de 15 mg/0.5 ml  
 administrar 1 vez por semana


**Información importante que debes saber antes de aplicar la inyección de MOUNJARO**

Lee estas Instrucciones de Uso y la Guía del Medicamento antes de utilizar la Pluma MOUNJARO y cada vez que surtas una receta. Podría haber información nueva. Esta información no sustituye una conversación con tu profesional de la salud acerca de tu afección médica o tratamiento.

Conversa con tu profesional de la salud acerca de cómo aplicar correctamente la inyección de MOUNJARO.

- MOUNJARO es una pluma precargada de dosis única.
- MOUNJARO se administra 1 vez por semana.
- Solo debe inyectarse debajo de la piel (por vía subcutánea).
- Tú u otra persona pueden aplicar la inyección en el estómago (abdomen) o muslo.
- Otra persona puede aplicar la inyección en la zona posterior de la parte superior del brazo.

**Guía de piezas**

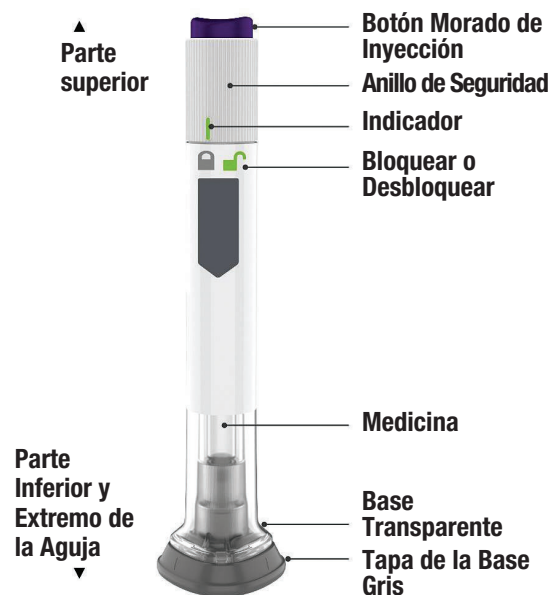

## Preparación para inyectar MOUNJARO

**Retira la Pluma** del refrigerador.

Deja la tapa gris de la base puesta hasta que estés listo para inyectarte.

**Verifica la etiqueta de la Pluma** para asegurarte de que tenga la medicina y la dosis correctas, y que la medicina no haya vencido.



**Inspecciona la Pluma** para asegurarte de que no esté dañada.

Asegúrate de que la medicina:

- no esté congelada
- sea incolora a ligeramente amarilla
- no esté turbia
- no tenga partículas


**Lávate las manos.**

Paso  
**1**

### Elige el lugar de inyección

Tu profesional de la salud puede ayudarte a elegir el lugar de inyección que sea más conveniente para ti.

Tú u otra persona pueden aplicar la inyección de la medicina en el estómago (abdomen) o muslo.

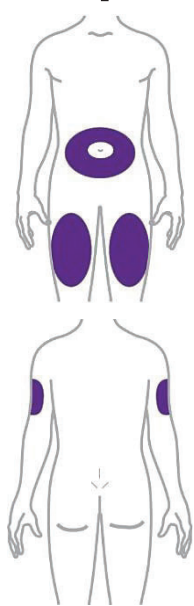

Otra persona debe administrarte la inyección en la zona posterior de la parte superior del brazo.

Cambia (varía) el lugar de la inyección semanalmente.


Puedes utilizar la misma zona del cuerpo, pero asegúrate de elegir un lugar diferente para la inyección en esa zona.

Paso  
**2**

### Retira la tapa de la base gris

Asegúrate de que la Pluma esté **bloqueada**.

**No** desbloquee la Pluma hasta que hayas colocado la base transparente sobre la piel y estés listo para inyectarte.

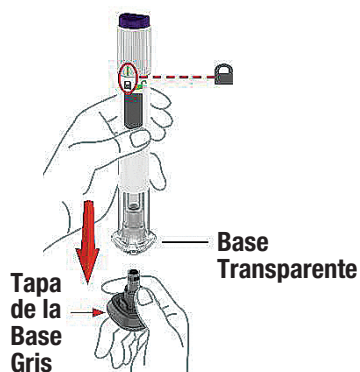

**Quita** la tapa de la base gris tirando firmemente de ella y deséchala en la basura doméstica.


**No** coloques nuevamente la tapa de la base gris, ya que podrías dañar la aguja.

**No** toques la aguja.

Paso  
**3**

### Coloca la base transparente sobre la piel y, a continuación, desbloquea

**Coloca** la base transparente de forma plana contra la piel en el lugar de la inyección.

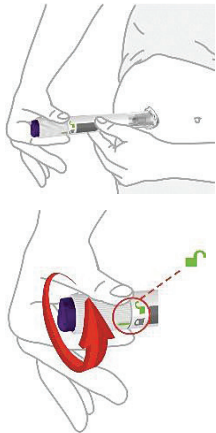

**Desbloquea** girando el anillo de bloqueo.

Paso  
**4**


### Mantén presionado hasta 10 segundos

**Mantén presionado** el botón morado de inyección por hasta 10 segundos.

**Escucha** lo siguiente:

- Primer clic = se inició la inyección
- Segundo clic = finalizó la inyección

Sabrás que te has administrado la inyección de forma completa cuando veas el émbolo gris.

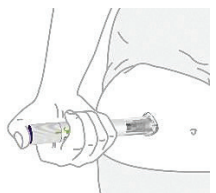

Émbolo  
Gris

**Después de la inyección, coloca la Pluma utilizada en un recipiente para objetos punzocortantes.**

Consulta la guía **Eliminación de las Plumas utilizadas**.

#### Eliminación de las Plumas utilizadas

- Coloca la Pluma utilizada en un recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes aprobado por la FDA inmediatamente después de su uso. **No** deseches (elimines) Plumas en la basura doméstica.
- Si no dispones de un recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes aprobado por la FDA, puedes utilizar un recipiente doméstico que:
  - esté hecho de plástico de alta resistencia,
  - pueda cerrarse con una tapa ajustada y sea resistente a las perforaciones, de modo que los objetos punzocortantes no se puedan salir,
  - vertical y estable durante el uso,
  - sea resistente a derrames, y
  - tenga una etiqueta que advierta que el recipiente contiene residuos peligrosos.
- Cuando tu recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes esté casi lleno, deberás seguir las normas comunitarias para desecharlo de manera correcta. Pueden existir leyes locales o estatales sobre cómo desechar agujas y jeringuillas usadas. Para obtener más información acerca de la eliminación segura de objetos punzocortantes, así como información específica sobre la eliminación de objetos punzocortantes en el estado en que vives, visita el sitio web de la FDA en: <http://www.fda.gov/safesharpsdisposal>.
- **No** recicles el recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes usado.

#### Almacenamiento y manejo

- Guarda tu Pluma en el refrigerador a una temperatura de 36 °F a 46 °F (2 °C a 8 °C).
- Podrías almacenar tu Pluma a una temperatura ambiente de hasta 86 °F (30 °C) durante un máximo de 21 días.
- **No** congeles tu Pluma. Si se congeló la Pluma, desecha la Pluma y usa una Pluma nueva.
- Almacena tu Pluma en el envase original para proteger tu Pluma de la luz.

- La Pluma tiene piezas de vidrio. Manipúlala con cuidado. Si se te cae la Pluma en una superficie dura, **no** la utilices. Usa una nueva Pluma para tu inyección.
- Mantén tu Pluma MOUNJARO y todas las medicinas fuera del alcance de los niños.

### Preguntas frecuentes

#### ¿Qué sucede si veo burbujas de aire en mi Pluma?

Las burbujas de aire son normales.

#### ¿Qué ocurre si mi Pluma no está a temperatura ambiente?

No es necesario calentar la Pluma a temperatura ambiente.

#### ¿Qué pasa si desbloqueo la Pluma y presiono el botón morado de la inyección antes de quitar la tapa de la base gris?

**No** retires la tapa gris de la base. Desecha la Pluma y usa una nueva.

#### ¿Qué pasa si hay una gota de líquido en la punta de la aguja cuando retiro la tapa gris de la base?

Una gota de líquido en la punta de la aguja es normal. **No** toques la aguja.

#### ¿Debo mantener presionado el botón de inyección hasta administrar completamente la inyección?

No es necesario, pero puede ayudarte a mantener la Pluma estable contra tu piel.

#### Escuché más de 2 clics durante la inyección—2 clics fuertes y 1 suave. ¿Me administré la inyección completa?

Algunas personas pueden escuchar un clic suave justo antes del segundo clic fuerte. Es el funcionamiento normal de la Pluma. **No** quites la Pluma de tu piel hasta escuchar el segundo clic fuerte.

#### No estoy seguro de que la Pluma funcionó correctamente.



Émbolo  
Gris

Verifica si recibiste la dosis. Tu dosis se administró correctamente si el émbolo gris es visible. También, consulta el **Paso 4** de las instrucciones.

Si no ves el émbolo gris, comunícate con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) para obtener más instrucciones. Hasta entonces, almacena tu Pluma de forma segura para evitar un pinchazo accidental.

#### ¿Qué pasa si hay una gota de líquido o sangre en mi piel después de aplicar la inyección?

Es normal. Presiona la zona de inyección con una bola de algodón o una gasa. **No** frotes el lugar de inyección.

### Otra información

- Si tienes problemas de visión, **no** utilices la Pluma sin ayuda de alguien capacitado para utilizar la Pluma MOUNJARO.

### Dónde obtener más información

- Si tienes preguntas o problemas con tu Pluma MOUNJARO, comunícate con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) o llama a tu profesional de la salud.
- Para obtener más información sobre la Pluma MOUNJARO, visita nuestro sitio web en [www.mounjaro.com](http://www.mounjaro.com).



Escanea este código para ir al sitio web  
[www.mounjaro.com](http://www.mounjaro.com)

Comercializado por:  
Lilly USA, LLC  
Indianápolis, IN 46285, EE. UU.

MOUNJARO es una marca comercial registrada de Eli Lilly and Company.

Copyright © 2022, 2024, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados.

Estas Instrucciones de Uso cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Revisado: Mayo 2024

MOU-0003-IFU-20240516

PP-TR-US-2246